

Solución oftálmica lubricante a base de Hialuronato de sodio, Trehalosa y Arabinogalactan.

Sin conservantes.

DESCRIPCIÓN

Solución oftálmica lubricante a base de Hialuronato de sodio, Trehalosa y Arabinogalactan, específicamente formulada para el tratamiento sintomático del ojo seco.

El Hialuronato de sodio confiere al producto una alta viscoelasticidad, garantizando una hidratación más eficaz de la superficie ocular para aliviar los síntomas asociados al ojo seco.

El Arabinogalactan es un mucopolisacárido natural extraído de la corteza del *Alerce canadiense*, con propiedades lubricantes y función protectora de la córnea.

La Trehalosa, en combinación con la vitamina E TPGS, confiere al producto propiedades antioxidantes, así como elevadas propiedades hidratantes.

La combinación de Arabinogalactan, Trehalosa y Hialuronato de sodio, confiere a Matrix ocular® 3 una actividad protectora e hidratante de larga duración que, en combinación con la acción emoliente del D-Pantenol, produce un rápido alivio.

La tecnología OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) representa un nuevo sistema de dispensación de las gotas, que asegura la esterilidad del producto sin el uso de conservantes.

COMPOSICIÓN

Arabinogalactan, Trehalosa, Hialuronato de sodio, Vitamina E-TPGS, D-Pantenol, Solución tamponada.

INDICACIONES

Matrix ocular® 3 es una solución oftálmica lubricante indicada para el tratamiento sintomático del ojo seco. Protege, hidrata y lubrica la superficie ocular.

Matrix ocular® 3 está particularmente indicado para el tratamiento de los síntomas (por ejemplo, sensación de cuerpo extraño, molestia, ardor o irritación) asociados con factores de estrés visual (por ejemplo, uso de pantallas) y/o ambientales (por ejemplo, humo, viento, calor seco, aire acondicionado, etc.).

Matrix ocular® 3 es compatible con lentes de contacto.

DOSIS

Aplicar 1 o 2 gotas de Matrix ocular® 3 en cada ojo, 2-3 veces al día.

MODO DE USO

Lavarse bien las manos antes de usar el producto.



Retirar el tapón quitando el precinto de seguridad.

Aplicar la cantidad de gotas recomendada en cada ojo, tirando del párpado inferior ligeramente hacia abajo y mirando hacia arriba.

Volver a poner el tapón inmediatamente después de su uso.

ADVERTENCIAS

- No utilizar el producto en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto.
- En caso de reacciones adversas, interrumpir el uso del producto y consultar con su médico.
- Sólo para uso oftálmico, no ingerir.
- Evitar que la punta del envase entre en contacto con los ojos.
- No utilizar el producto si la caja está dañada.
- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad que se indica en la caja y en el envase. La fecha de caducidad se refiere al producto sin abrir y conservado correctamente.

CONSERVACIÓN

- Mantener el producto alejado de fuentes de calor y fuera del alcance de los niños.
- El producto puede utilizarse hasta 4 meses después de la primera apertura.
- Conservar el producto a una temperatura inferior a 30°C.
- Cerrar bien el envase después de su uso.
- No desechar el envase en el medio ambiente después de su uso.

PRESENTACIÓN

Envase de 10 ml con dispensador OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser).

Rev. 04/2021

FABRICANTE

ITALDEVICE Srl,
Via Laurentina Km 26,700
00071 Pomezia (Roma) (Italia)

DISTRIBUIDOR

BRILL PHARMA, S.L.
C/ Munner, 10 - 08022 Barcelona (España)
Patente registrada.

Solução oftálmica lubrificante à base de Hialuronato de sódio, Trealose e Arabinogalactan.

Sem conservantes.

DESCRIÇÃO

Solução oftálmica lubrificante à base de Hialuronato de sódio, Trealose e Arabinogalactan, especificamente formulada para o tratamento sintomático do olho seco.

O Hialuronato de sódio confere ao produto uma alta viscoelasticidade, garantindo uma hidratação mais eficaz da superfície ocular para aliviar os sintomas associados ao olho seco.

O Arabinogalactano é um mucopolissacarídeo natural extraído da casca do *Larício-americano*, com propriedades lubrificantes e função protetora da córnea.

A Trealose, em combinação com a vitamina E TPGS, confere ao produto propriedades antioxidantes, assim como elevadas propriedades hidratantes.

A combinação de Arabinogalactano, Trealose e Hialuronato de sódio confere a Matrix ocular® 3 uma atividade protetora e hidratante de longa duração que, em combinação com a ação emoliente do D-Pantenol, produz um rápido alívio.

A tecnologia OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) representa um novo sistema de dispensa das gotas, que assegura a esterilidade do produto sem o uso de conservantes.

COMPOSIÇÃO

Arabinogalactan, Trealose, Hialuronato de sódio, Vitamina E-TPGS, D-Pantenol, Solução tamponada.

INDICAÇÕES

Matrix ocular® 3 é uma solução oftálmica lubrificante indicada para o tratamento do olho seco, para a proteção, hidratação e lubrificação da superfície ocular.

Matrix ocular® 3 é particularmente indicado para o tratamento dos sintomas (por exemplo, sensação de corpo estranho, incômodo, ardor ou irritação) associados com fatores de stress visual (por exemplo, uso de ecrãs) e/ou ambientais (por exemplo, fumo, vento, calor seco, ar condicionado, etc.).

Matrix ocular® 3 é compatível com lentes de contacto.

DOSE

Aplicar 1 ou 2 gotas de Matrix ocular® 3 em cada olho, 2-3 vezes por dia.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Lavar bem as mãos antes de usar o produto.



Retirar a tampa removendo a película de segurança.

Aplicar a quantidade recomendada de gotas em cada olho, puxando a pálpebra inferior ligeiramente para baixo e olhando para cima.

Voltar a colocar a tampa imediatamente após a sua utilização.

ADVERTÊNCIAS:

- Não utilizar o produto em caso de hipersensibilidade conhecida a algum dos componentes do produto.
- Em caso de reações adversas, interromper o uso do produto e consultar o seu médico.
- Apenas para uso oftálmico; não ingerir.
- Evitar que a ponta da embalagem entre em contacto com os olhos.
- Não utilizar o produto se a caixa estiver danificada.
- Não utilizar o produto depois da data de validade indicada na caixa e na embalagem. A data de validade refere-se ao produto por abrir e conservado corretamente.

CONSERVAÇÃO

- Manter o produto afastado de fontes de calor e fora do alcance das crianças.
- O produto pode ser utilizado até 4 meses após a primeira abertura.
- Conservar o produto a uma temperatura inferior a 30°C.
- Fechar bem a embalagem após a sua utilização.
- Não eliminar a embalagem no meio ambiente após a sua utilização.

APRESENTAÇÃO

Embalagem de 10 ml com dispensador OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser).

Rev. 04/2021

FABRICANTE

ITALDEVICE Srl,
Via Laurentina Km 26,700
00071 Pomezia (Roma) (Itália)

DISTRIBUIDOR

BRILL PHARMA UNIP., LDA
Av. D. João II, Lote 1.13.01,
Loja L/N, 3º Piso, 1990-078 Lisboa (Portugal)
Patente registada.